



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



# MASCARILLA QUIRÚRGICA

**Mascarilla quirúrgica descartable, Tipo I, de 3 capas, con tiras elásticas y adaptador nasal.**

**Código. 904254**



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mascarilla descartable, compuesta de un cuerpo de máscara facial, con tres capas de estructura, una pinza nasal y dos cuerdas para los oídos.
- ✓ El cuerpo de la máscara facial se coloca, se une o se moldea, entre las capas de tela.
- ✓ La mascarilla no se desintegrará, partirá, ni rasgará durante el uso previsto.
- ✓ La mascarilla tiene un medio por el cual puede ajustarse estrechamente sobre la nariz, la boca y el mentón del usuario y asegura que la mascarilla se ajuste a los lados.
- ✓ Está diseñada para brindar protección contra salpicaduras y gotas direccionadas hacia y desde el usuario.
- ✓ Puente nasal, para mejorar el ajuste al colocarse sobre el contorno de la nariz.

## MEDIDAS

17.5 cm de longitud x 9.5 cm de altura

## MATERIALES

Las capas interna y externa están hechas de telas no tejidas de polipropileno, y la capa intermedia está hecha de tela de polipropileno soplado por fusión.

## COBERTURA DE RIESGO/USO PREVISTO:

Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.

Uso regular para evitar la propagación de bacterias y virus transmitidos con esputo.

## PRESENTACION:

50 unidades, dentro de una caja de cartón simple de 19.5cm X 10cm X 7.5 cm

## CERTIFICACIONES:

EN 14683 CE Type I BFE 95%



**LIBUS**<sup>®</sup>  
F E E L S A F E

+ +



#### **ADVERTENCIAS:**

Las mascarillas Type I solo deben usarse para pacientes y otras personas para reducir el riesgo de propagación de infecciones particularmente en situaciones de epidemia o pandemia.

Las máscaras tipo I no están destinadas a ser utilizadas por profesionales de la salud en un quirófano o en otros entornos médicos con requisitos similares.

#### **INSTRUCCIONES DE USO CORRECTO**

1. Antes de tocar una mascarilla limpia, debe haber un previo lavado de manos con agua y jabón.
2. Una vez, se haya tomado una mascarilla nueva (sin uso) de la caja, revisar, para asegurar, que no tenga defectos, agujeros, ni desgarros en el material. Si la mascarilla, tiene alguna de estas deficiencias, desechar y sacar otra nueva de la caja.
3. Orientar, la parte superior de la mascarilla, correctamente, para que quede lo más cerca posible de la piel, tener en cuenta que la parte superior de la misma, tiene un borde flexible, con una cinta metálica recubierta, que puede moldear alrededor de la nariz. Cerciorarse que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocar la mascarilla.
4. Fijar la mascarilla, hacia la cabeza, por medio de las dos bandas para las orejas. Tomar las bandas y poner una, alrededor de una de las orejas y luego la otra, alrededor de la del otro lado.
5. Ajustar la pieza que va en la nariz; cuando la mascarilla, esté en su lugar, en la cabeza y la cara, usar el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz, para buscar que haya un ajuste correcto.
6. Ajustar la mascarilla en la cara y debajo de la barbilla, una vez que, esté totalmente asegurada, acomodar para que cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla.